

## **Boso Classic használati útmutató**

### *Előszó*

Ez a vérnyomásmérő készülék megfelel az európai előírásoknak, amelyek az orvosi termékekre vonatkozó törvény alapjául szolgálnak. (CE) jelölés, valamint a EN 1060 Európai norma 1. részének: „nem invazív vérnyomásmérők – általános követelmények”, és a 2. részének: kiegészítő követelmények a mechanikus vérnyomásmérőrendszerek

A mérőtechnikai ellenőrzéseket – legkésőbb kétévenként elvégezheti a gyártó, mérésügyért felelős hatóság, vagy olyan személyek, akik az orvosi termékek működtetésére vonatkozó rendelet 6. paragrafusának eleget tesznek.

Fontos útmutatás:

Óvja a készüléket az erős rázkódásoktól (kerülje az ütések és a leejtést)!

Óvja a kosztól és a nedvességtől!

Figyeljen arra, hogy a mandzsetta erős, hegyes, éles tárgyak által ne sérüljön meg (tű, olló stb.)

Ne pumpálja fel 300 mmHg fölé!

A mérési idők max 2 percig tartsanak!

Két mérés között min. 2 percnak kell eltelnie!

A mandzsettát úgy kell felhelyezni, hogy a mandzsetta széle kb. 2-3 cm-el a könyökhajlat felett legyen és a mandzsettán lévő jelzés (gumicső csatlakozásánál) az artéria felett legyen.

### *A mérés kivitelezése*

Zárja el a levegőleeresztő szelepet teljesen, pumpálja fel a mandzsettát a szisztolés nyomás fölé.

A leeresztő szelepen befolyásolható a leeresztés sebessége, a WHO javaslata szerint az ideális leeresztési sebesség 2-3 mmHg/sec.

A mérési érték rögzítése után nyissa meg jobban a szelepet (gyors leeresztés) és teljes mértékben eressze le a mandzsettából a levegőt.

Mandzsetta

**Kérjük, csak boso mandzsettát alkalmazzon, melynek speciális a csatlakozója!**

*Technikai adatok:*

Mérési határ: 0-300 mmHg

A vérnyomásmérő kijelzőjének pontossága:  $\pm 3$  mmHg

Készülék tisztítása:

A készülék tisztításához használjon száraz, puha rongyot!

A mandzsetta tisztításához távolítsa el a gumitasakot. A mandzsetta külső része kézzel max. 30 fokon mosható.

A garancia feltételei a garancialevélben találhatóak.

Egy garanciaigény csak akkor állítható ki, ha a kereskedő által kitöltött és lebélyegzett garancialevelet a készülékkel együtt és a hiba leírásával a sérülésmentességet biztosítva becsomagolva a kereskedő vagy a gyártó részére visszaküldi: